

Zij zijn tevreden!

Dit zijn de meningen van onze klanten

„Vóór de Rolly was het aan- en uittrekken van kousen soms pijnlijk, vooral wanneer een verpleegkundige met iets dikkere vingers daarbij hielp. Bovendien was er een risico op krassen op mijn benen, die tot infecties kunnen leiden.*

De Rolly heeft het aan- en uittrekken van compressiekousen veel gemakkelijker gemaakt. Toen de verpleegkundigen de Rolly* voor het eerst zagen, waren ze verbaasd hoe nuttig dit hulpmiddel is...'*

* Rolly = DOFF N' DONNER ROLLY



sigvaris

Nederland

Proflebo BV
Hekkehorst 28
7207 BN Zutphen
Tel 0575 725 999
M info@proflebo.nl

www.proflebo.nl

Export

SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8
9014 St. Gallen
Switzerland
Tel. +41 71 272 40 00

www.sigvaris.com


SIGVARIS and SIGVARIS GROUP are registered trademarks of SIGVARIS AG, 9014 St. Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.
© 2025 Copyright by SIGVARIS AG, CH-9014 St. Gallen/Switzerland



BM / xx / 12.2024 / V1 / 359477_DACH_de

SIGVARIS
GROUP

sigvaris

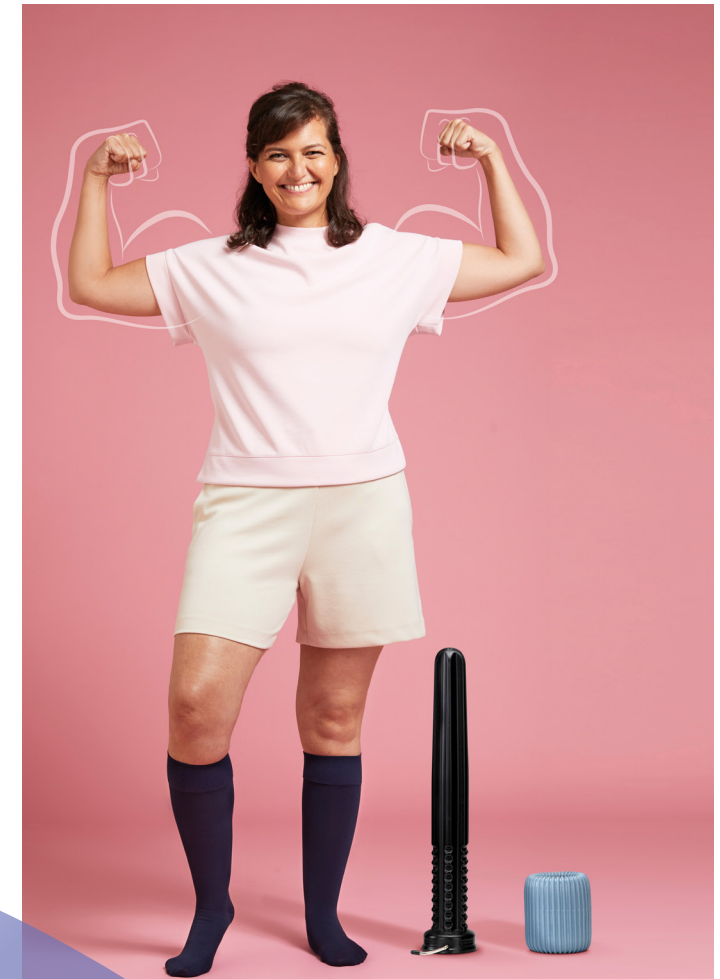

DOFF N' DONNER SET

De makkelijke manier om compressiekousen aan te trekken.

Compressiekousen aantrekken

Een uitdaging voor veel dragers van compressiekousen.

Voordat de kous echter zijn volledige effect op het been kan uitoefenen, staan veel dragers van compressiekousen voor een belangrijke uitdaging: Hoe krijg je de kous over het been?

Door de aanwezige compressiedruk is het vaak een uitdaging om de kous over de enkel te trekken en correct op het been te plaatsen. Daar komt bij dat veel mensen beperkt bewegingsvrij zijn of zelfs onvoldoende kracht in hun handen en vingers hebben. Dit alles kan het aantrekken van een kous tot een ware krachttoer maken.

Maar... hoe zou het zijn als het aantrekken van compressiekousen gemakkelijk zou gaan?

De oplossing: DOFF N' DONNER SET

Aantrekken hoeft niet moeilijk te zijn!

De innovatieve aan- en uittrekhelp DOFF N' DONNER SET maakt dagelijks gebruik van compressiekousen makkelijker en het aan- en uittrekken kinderspel.



DOFF N' DONNER SET

De revolutionaire oplossing voor wie kousen draagt en voor medisch professionals

De DOFF N' DONNER SET bestaat uit:



A

De DOFF N' DONNER CONE vergemakkelijkt het oprollen van een compressiekous op de DOFF N' DONNER ROLLY. Met de DOFF N' DONNER CONE is een medische compressiekous ook moeiteloos van de DOFF N' DONNER ROLLY af te rollen.

Let op: de DOFF N' DONNER CONE mag niet op gevoelige oppervlakken worden bevestigd, omdat daardoor rubberafdrukken kunnen achterblijven.

B

De DOFF N' DONNER ROLLY is een zacht hulpmiddel waarmee medische compressiekousen snel en pijnloos over een been of arm kunnen glijden. Bovendien is hij ook te gebruiken als uittrekhelp.

De DOFF N' DONNER SET is geschikt voor de volgende kousmodellen:

- *Onderbeenkous (open en gesloten voet)
- *Dijbeenkous (open en gesloten voet)
- *Arm kous (zonder vaste handschoen)

Belangrijkste voordelen van de DOFF N' DONNER SET

Een overzicht

De compressiekous wordt over de zachte DOFF N' DONNER ROLLY opgerold en glijdt zo zacht en pijnloos over het been omhoog of omlaag, wat het aan- en uittrekken vergemakkelijkt.



Snel en eenvoudig aan- en uittrekken van de compressiekousen.



Gemakkelijk en comfortabel, ook bij pijnlijke wonden, littekens of open benen. Open huid en wonden moeten voor het aantrekken van de compressiekousen worden bedekt met een geschikte wondafdekking.



Grotere zelfstandigheid, omdat het aan- en uittrekken van de compressiekousen **minder kracht** en dus minder lichamelijke inspanning kost.



Door gebruik van de DOFF N' DONNER SET kan schade aan de kousen worden vermeden, omdat ze **voorzichtiger** worden behandeld.



Optimale ondersteuning van het verplegend personeel bij de dagelijkse routine met compressiekousen.



De set is eenvoudig te reinigen.

Wilt u zien hoe het aan- en uittrekken met de DOFF N' DONNER SET precies werkt?

Bezoek dan onze website of vraag ernaar in de medische vakhandel.

