

sigvaris



Optiform Feel Productoverzicht

VLAKBREI
ARMKOUSSEN

OPTIFORM FEEL



De nieuwe productlijn **Optiform Feel** is een aanvulling op het vlakbrei assortiment en biedt een zeer effectieve ondersteuning in alle stadia van lymfoedeem en lipoeedeem in de bovenste extremiteiten.

Door de unieke nieuwe samenstelling van het garen is Optiform Feel uiterst aangenaam om te dragen. Naast polyamide en elastaan is dit vooral te danken aan een zeer hoog aandeel Tencel™ Lyocell, een milieuvriendelijke vezel gemaakt van hernieuwbare grondstoffen die bijzonder zacht is voor de huid. De gladde textuur zorgt voor een zijdezacht gevoel zonder dat dit ten koste gaat van de stabiliteit.

De uitstekende materiaaleigenschappen van Tencel™ Lyocell -uitzonderlijk ademend, vochtabsorberend en ventilerend - creëren een ideaal huidklimaat.

Dit maakt Optiform Feel ook geschikt voor de gevoelige en allergiegevoelige huid.

De hoogwaardige afwerking van het breiwerk - vooral de platte nauwelijks voelbare naden tot in de vingertoppen - maken de overtuigende eigenschappen van de Optiform Feel compleet.

Portfolio

Optiform Feel						
Model / CCL						
CCL1	•	•	•	•	•	•
CCL2	•	•	•	•	•	
CCL3	•	•	•	•	•	

ACI Handschoen



A-E Verlengde handschoen



A-G Handschoen en arm 1-delig



C-E Armdeel



C-G Arm



Vinger



Opties



Assortimentsoverzicht

Model AC₁ Handschoen

Optiform	Feel	Feel	Feel
			
Model / CCL			
CCL1 15–21 mmHg	●	●	●
CCL2 23–32 mmHg	●	●	●
CCL3 34–46 mmHg	●	●	●

Alle opties voor model AC₁ Handschoen

		Opties	Omschrijving	Toepassing
Handdeel	Zonder vingers	Met standaard duim	Handschoen zonder vingers met standaard duim van 1.5 cm lengte	Compressie op de hand en duim, zonder vingers
		Met maatwerk duim	Handschoen zonder vingers met duim van zelf te bepalen lengte	Compressie op de hand en duim, zonder vingers
	Open vingers		Handschoen met open vingers	Compressie op de hand, duim en vingers
	Gesloten vingers		Handschoen met gesloten vingers	Compressie op de hand, duim en vingers
Model boord	Recht		Rechte boord aan het proximale uiteinde van de handschoen	Standaard rechte afwerking
	Schuin		Schuin opgebreide boord aan het proximale uiteinde van de handschoen	Voorkomt circulaire insnoering
Opties boord	Optiline		Gebreide standaard hoogwaardige afwerking	Verhoogd comfort voor een soepele overgang; gewenste toepassing: korte of lange handschoen
	Poreus eind (incl. Optiline)	3 cm (standaard)	Minder compressie aan het uiteinde van het manchet	Zorgt voor een gelijkmatige overgang bij overlapping met een 2- delige voorziening. Ook trekt de handschoen makkelijker aan en uit
		6 cm (optie)	Minder compressie aan het uiteinde van het manchet	Zorgt voor een gelijkmatige overgang bij overlapping met een 2- delige voorziening. Ook trekt de handschoen makkelijker aan en uit



Alle opties voor model AC₁ Handschoen

Opties		Omschrijving	Toepassing
Overig	Pocket voor pelotte	Ingebreide pocket waarin een pelotte geplaatst kan worden (3 zijden gestikt)	Voor het plaatsen van pelottes/polsters om lokaal meer compressie te geven of om uitstekende delen te ontlasten
	Voering	Ingenaaide voering welke de wrijving tussen kous en huid vermindert (4 zijden gestikt)	Bijzonder zacht voor de huid; bij gevoelige of beschadigde huid
	Rits	Op de handrug of aan de duimzijde Ingenaaide ritssluiting	In geval van beperkte mobiliteit; maakt het aan- en uittrekken makkelijker. Vergemakkelijkt tevens het plaatsen en/ of verwisselen van polstermaterialen
	Haak&oogsluiting (optioneel bij rits)	Net als BH-sluiting	Maakt het sluiten van de rits makkelijker. Voorkomt beschadiging van de huid

Assortimentsoverzicht

Model A-E Lange handschoen

Optiform	Feel
	
Model / CCL	
CCL1 15–21 mmHg	●
CCL2 23–32 mmHg	●
CCL3 34–46 mmHg	●

Alle opties voor model A-E Lange handschoen

		Opties	Omschrijving	Toepassing
Handdeel	Zonder vingers	Met standaard duim	Handschoen zonder vingers met standaard duim van 1.5 cm lengte	Compressie op de hand en duim, zonder vingers
		Met maatwerk duim	Handschoen zonder vingers met duim van zelf te bepalen lengte	Compressie op de hand en duim, zonder vingers
	Open vingers		Handschoen met open vingers	Compressie op de hand, duim en vingers
	Gesloten vingers		Handschoen met gesloten vingers	Compressie op de hand, duim en vingers
Model boord	Recht		Rechte boord aan het proximale uiteinde van de handschoen	Standaard rechte afwerking
	Schuin		Schuin opgebreide boord aan het proximale uiteinde van de handschoen	Voorkomt circulaire insnoering
Opties boord	Optiline		Gebreide standaard hoogwaardige afwerking	Verhoogd comfort voor een soepele overgang; gewenste toepassing: korte of lange handschoen
	Poreus eind (incl. Optiline)	3 cm (standaard)	Minder compressie aan het uiteinde van het manchet	Zorgt voor een gelijkmatige overgang bij overlapping met een 2- delige voorziening. Ook trekt de handschoen makkelijker aan en uit
		6 cm (optie)	Minder compressie aan het uiteinde van het manchet	Zorgt voor een gelijkmatige overgang bij overlapping met een 2- delige voorziening. Ook trekt de handschoen makkelijker aan en uit
	Siliconenboord	3.5 cm	3.5 cm siliconenband om afzakken tegen te gaan	Voor een betere fixatie van het hulpmiddel. De siliconenband zorgt ervoor dat het hulpmiddel op de juiste plaats blijft zitten
		5 cm	5 cm siliconenband om afzakken tegen te gaan	Voor een betere fixatie van het hulpmiddel. De siliconenband zorgt ervoor dat het hulpmiddel op de juiste plaats blijft zitten

Alle opties voor model A-E Lange handschoen

	Opties		Omschrijving	Toepassing
Overig	Pocket voor pelotte		Ingebreide pocket waarin een pelotte geplaatst kan worden (3 zijden gestikt)	Voor het plaatsen van pelottes/polsters om lokaal meer compressie te geven of om uitstekende delen te ontlasten
	Voering		Ingenaaide voering welke de wrijving tussen kous en huid vermindert (4 zijden gestikt)	Bijzonder zacht voor de huid; bij gevoelige of beschadigde huid
	Rits	Voor hand-deel: op de handrug of aan duimzijde Voor armdeel: links, rechts of op boven-zijde arm		In geval van beperkte mobiliteit; maakt het aan- en uittrekken makkelijker. Vergemakkelijkt tevens het plaatsen en/ of verwisselen van polstermaterialen
	Haak&oogsluiting (optioneel bij rits)		Net als BH-sluiting	Maakt het sluiten van de rits makkelijker. Voorkomt beschadiging van de huid
	Siliconen strip	3.5 cm 5.0 cm	Strip siliconenband	Te gebuiken op zacht weefsel, biedt extra fixatie van het hulpmiddel



Assortimentsoverzicht

Model A-G Handschoen met armkous 1-delig

Optiform	Feel
	
Model / CCL	
CCL1 15–21 mmHg	●
CCL2 23–32 mmHg	●
CCL3 34–46 mmHg	●

Alle opties voor model A-G Handschoen met armkous 1-delig

	Opties	Omschrijving	Toepassing	
Handdeel	Zonder vingers	Met standaard duim	Handschoen zonder vingers met standaard duim van 1.5 cm lengte	Compressie op de hand en duim, zonder vingers
		Met maatwerk duim	Handschoen zonder vingers met duim van zelf te bepalen lengte	Compressie op de hand en duim, zonder vingers
	Open vingers		Handschoen met open vingers	Compressie op de hand, duim en vingers
	Gesloten vingers		Handschoen met gesloten vingers	Compressie op de hand, duim en vingers
Boord proximaal	Recht		Rechte boord aan het proximale uiteinde van de handschoen	Standaard rechte afwerking
	Schuin		Schuin opgebreide boord aan het proximale uiteinde van de handschoen. De buitenzijde is langer dan de binnenzijde	Voorkomt circulaire insnoering
	Extra schuin		Extra schuin opgebreide boord aan het proximale uiteinde van de handschoen. De buitenzijde is langer dan de binnenzijde	Voorkomt circulaire insnoering
Opties boord proximaal	Optiline		Gebreide standaard hoogwaardige afwerking	Verhoogd comfort voor een soepele overgang; gewenste toepassing: korte of lange handschoen
	Poreus eind (incl. Optiline)	3 cm (standaard)	Verminderde compressie aan de bovenzijde van de armkous	Zorgt voor een gelijkmatige overgang
		6 cm (optie)	Verminderde compressie aan de bovenzijde van de armkous	Zorgt voor een gelijkmatige overgang
	Siliconenboord	3.5 cm	3.5 cm siliconenband om afzakken tegen te gaan	Voor een betere fixatie van het hulpmiddel. De siliconenband zorgt ervoor dat het hulpmiddel op de juiste plaats blijft zitten
		5 cm	5 cm siliconenband om afzakken tegen te gaan	Voor een betere fixatie van het hulpmiddel. De siliconenband zorgt ervoor dat het hulpmiddel op de juiste plaats blijft zitten
	3/4 Siliconenboord	3.5 cm	3/4 siliconenboord ingenaaid aan bovenzijde van de armkous. De binnenzijde van de arm blijft vrij van siliconenboord.	Extra grip zonder dat de (gevoelige) huid aan de binnenzijde van de arm in aanraking komt met siliconenboord

Alle opties voor model A-G Handschoen met armkous 1-delig

	Opties	Omschrijving	Toepassing	
Overig	Ellebooghoek	160°	Standaard optie	Standaard anatomisch gevormde elleboog
		150°		Voor specifieke anatomische en/of pathologische omstandigheden
		135°		Voor specifieke anatomische en/of pathologische omstandigheden
	Elleboogfunctie-zone		Aangepast breiwerk rond de elleboog	Hoog comfort door verminderde plooivorming ter hoogte van de elleboog
	Bolero	Ééndelig	Gebreide rugband welke beide armkousen verbindt	Biedt extra steun; verbinding van twee armkousen middels een rugpand. Wanneer andere bevestigingsopties niet mogelijk en/of functioneel zijn
		Tweedelig met haak&oog-sluiting	Gebreide rugband welke beide armkousen verbindt. Twee-delig, te sluiten met haak&oogsluiting	Biedt extra steun; verbinding van twee armkousen middels een rugpand. Wanneer andere bevestigingsopties niet mogelijk en/of functioneel zijn
	Lichaamsgordel		Doorgebreide schouderkap met lichaamsgordel	Voorkomt afzakken
	Schouderkap		Doorgebreide schouderkap met sluiting voor bevestiging aan BH-bandje	Voorkomt afzakken
	Pocket voor pelotte		Ingebreide pocket waarin een pelotte geplaatst kan worden (3 zijden gestikt)	Voor het plaatsen van pelottes/polsters om lokaal meer compressie te geven of om uitstekende delen te ontlasten
	Voering		Ingenaaide voering welke de wrijving tussen kous en huid vermindert (4 zijden gestikt)	Bijzonder zacht voor de huid; geadviseerd bij gevoelige of beschadigde huid
	Rits	In hand- of armdeel	Voor handdeel: op de handrug of aan duimzijde Voor armdeel: links, rechts of op bovenzijde arm	In geval van beperkte mobiliteit; maakt het aan- en uittrekken makkelijker. Vergemakkelijkt tevens het plaatsen en/ of verwisselen van polstermaterialen
Haak&oogsluiting (optioneel bij rits)		Net als BH-sluiting	Maakt het sluiten van de rits makkelijker. Voorkomt beschadiging van de huid	
Siliconen strip	3.5 cm 5.0 cm	Strip siliconenband	Te gebuiken op zacht weefsel, biedt extra fixatie voor het hulpmiddel	



Assortimentsoverzicht

Model C-E Arm onderarm

Optiform	Feel
	
Model / CCL	
CCL1 15–21 mmHg	●
CCL2 23–32 mmHg	●
CCL3 34–46 mmHg	●

Alle opties voor model C-E Arm onderarm

	Opties	Omschrijving	Toepassing	
Boord proximaal	Recht	Rechte boord aan het proximale uiteinde van de handschoen	Standaard boord	
	Schuin	Schuin opgebreide boord aan het proximale uiteinde van de handschoen. De buitenzijde is langer dan de binnenzijde	Voorkomt circulaire insnoering	
Opties boord proximaal	Optiline	Gebreide standaard hoogwaardige afwerking	Verhoogd comfort voor een soepele overgang	
	Poreus eind (incl. Optiline)	3 cm (standaard)	Verminderde compressie aan de bovenzijde van de armkous	Zorgt voor een gelijkmatige overgang
		6 cm (optie)	Verminderde compressie aan de bovenzijde van de armkous	Zorgt voor een gelijkmatige overgang
	Siliconenboord	3.5 cm	3.5 cm siliconenband om afzakken tegen te gaan	Voor een betere fixatie van het hulpmiddel. De siliconenband zorgt ervoor dat het hulpmiddel op de juiste plaats blijft zitten
		5 cm	5 cm siliconenband om afzakken tegen te gaan	Voor een betere fixatie van het hulpmiddel. De siliconenband zorgt ervoor dat het hulpmiddel op de juiste plaats blijft zitten
Boord distaal	Recht	Standaard optie (voor elk model zonder vaste handschoen)		

Alle opties voor model C-E Arm onderarm

		Opties	Omschrijving	Toepassing
Opties boord distaal	Poreus manchet	Standaard (3.0 cm)	Verminderde compressie aan de onderzijde van de armkous (pols)	Zorgt voor een gelijkmatige overgang bij overlapping met een 2- delige voorziening
		Optioneel (6.0 cm)	Verminderde compressie aan de onderzijde van de armkous (pols)	Zorgt voor een gelijkmatige overgang bij overlapping met een 2- delige voorziening
Overig	Pocket voor pelotte		Ingebreide pocket waarin een pelotte geplaatst kan worden (3 zijden gestikt)	Voor het plaatsen van pelottes/polsters om lokaal meer compressie te geven of om uitstekende delen te ontlasten
	Voering		Ingenaaide voering welke de wrijving tussen kous en huid vermindert (4 zijden gestikt)	Bijzonder zacht voor de huid; geadviseerd bij gevoelige of beschadigde huid
	Rits	In armdeel	Positie rits: buiten-, binnen- voor- of achterzijde van de arm	In geval van beperkte mobiliteit; maakt het aan- en uittrekken makkelijker. Vergemakkelijkt tevens het plaatsen en/ of verwisselen van polstermaterialen
	Haak&oogsluiting (optioneel bij rits)		Net als BH-sluiting	Maakt het sluiten van de rits makkelijker. Voorkomt beschadiging van de huid
	Siliconen strip	3.5 cm 5.0 cm	Strip siliconenband	Te gebuiken op zacht weefsel, biedt extra fixatie voor het hulpmiddel



Assortimentsoverzicht

Model C-G Armkous

Optiform	Feel
	
Model / CCL	
CCL1 15–21 mmHg	●
CCL2 23–32 mmHg	●
CCL3 34–46 mmHg	●

Alle opties voor model C-G Armkous

	Opties	Omschrijving	Toepassing	
Boord proximaal	Recht	Rechte boord aan het proximale uiteinde van de handschoen	Standaard boord	
	Schuin	Schuin opgebreide boord aan het proximale uiteinde van de handschoen. De buitenzijde is langer dan de binnenzijde	Voorkomt circulaire insnoering	
	Extra schuin	Extra schuin opgebreide boord aan het proximale uiteinde van de handschoen. De buitenzijde is langer dan de binnenzijde	Voorkomt circulaire insnoering	
POpties boord proximaal	Optiline	Gebreide standaard hoogwaardige afwerking	Verhoogd comfort voor een soepele overgang; gewenste toepassing: korte of lange handschoen	
	Poreus eind (incl. Optiline)	3 cm (standaard)	Verminderde compressie aan de bovenzijde van de armkous	Zorgt voor een gelijkmatige overgang bij overlapping met een 2- delige voorziening
		6 cm (optie)	Verminderde compressie aan de bovenzijde van de armkous	Zorgt voor een gelijkmatige overgang bij overlapping met een 2- delige voorziening
	Siliconenboord	3.5 cm	3.5 cm siliconenband om afzakken tegen te gaan	Voor een betere fixatie van het hulpmiddel. De siliconenband zorgt ervoor dat het hulpmiddel op de juiste plaats blijft zitten
		5 cm	5 cm siliconenband om afzakken tegen te gaan	Voor een betere fixatie van het hulpmiddel. De siliconenband zorgt ervoor dat het hulpmiddel op de juiste plaats blijft zitten
	3/4 Siliconenboord	3.5 cm	3/4 siliconenboord ingenaaid aan bovenzijde van de armkous. De binnenzijde van de arm blijft vrij van siliconenboord.	Extra grip zonder dat de (gevoelige) huid aan de binnenzijde van de arm in aanraking komt met siliconenboord
Boord distaal				
	Recht	Standaard optie (voor elk model zonder vaste handschoen)		

Alle opties voor model C-G Armkous

		Opties	Omschrijving	Toepassing
Opties boord distaal	Poreus manchet	Standaard (3.0 cm)	Standaard optie	Zorgt voor een gelijkmatige overgang bij overlapping met een 2- delige voorziening
		Optioneel (6.0 cm)	Optioneel	Zorgt voor een gelijkmatige overgang bij overlapping met een 2- delige voorziening
Overig	Ellebooghoek	160°	Standaard optie	Standaard anatomisch gevormde elleboog
		150°		Voor specifieke anatomische en/of pathologische omstandigheden
		135°		Voor specifieke anatomische en/of pathologische omstandigheden
	Elleboogfunctie- zone		Aangepast breiwerk rond de elleboog	Hoog comfort door verminderde plooivorming ter hoogte van de elleboog
	Bolero	Ééndelig	Gebreide rugband welke beide armkousen verbindt	Biedt extra steun; verbinding van twee armkousen middels een rugpand. Wanneer andere bevestigingsopties niet mogelijk en/of functioneel zijn
		Tweedelig met haak&oogsluiting	Gebreide rugband welke beide armkousen verbindt. Twee-delig, te sluiten met haak&oogsluiting	Biedt extra steun; verbinding van twee armkousen middels een rugpand. Wanneer andere bevestigingsopties niet mogelijk en/of functioneel zijn
	Lichaamsgordel		Doorgebreide schouderkap met lichaamsgordel	Voorkomt afzakken
	Schouderkap		Doorgebreide schouderkap met sluiting voor bevestiging aan BH-bandje	Voorkomt afzakken
	Pocket voor pelotte		Ingebreide pocket waarin een pelotte geplaatst kan worden (3 zijden gestikt)	Voor het plaatsen van pelottes/polsters om lokaal meer compressie te geven of om uitstekende delen te ontlasten
	Voering		Ingenaaide voering welke de wrijving tussen kous en huid vermindert (4 zijden gestikt)	Bijzonder zacht voor de huid; geadviserd bij gevoelige of beschadigde huid
	Rits	In armdeel	Positie rits: buiten-, binnen- voor- of achterzijde van de arm	In geval van beperkte mobiliteit; maakt het aan- en uittrekken makkelijker. Vergemakkelijkt tevens het plaatsen en/of verwisselen van polstermaterialen
	Haak&oogsluiting (optioneel bij rits)		Net als BH-sluiting	Maakt het sluiten van de rits makkelijker. Voorkomt beschadiging van de huid
	Siliconen strip	3.5 cm 5.0 cm	Strip siliconenband	Te gebuiken op zacht weefsel, biedt extra fixatie voor het hulpmiddel



Assortimentsoverzicht

Model Vinger (los)

Optiform	Feel
	
Model / CCL	
CCL1 15–21 mmHg	●
CCL2 23–32 mmHg	
CCL3 34–46 mmHg	

Alle opties voor model Vinger (los)

		Opties	Omschrijving	Toepassing
Vinger	Open vinger	Optiline	Standaard afwerking (zonder polsband)	
		Met polsband	Polsband met klittebandsluiting	Voor betere fixatie
	Gesloten vinger	Optiline	Standaard afwerking (zonder polsband)	
		Met polsband	Polsband met klittebandsluiting	Voor betere fixatie

Opties

Hand



Zonder vingers met duim



Open vingers



Gesloten vingers

Model proximale boord



Recht



Schuin opgebroid




Extra schuin opgebroid

Opties boord



Optiline

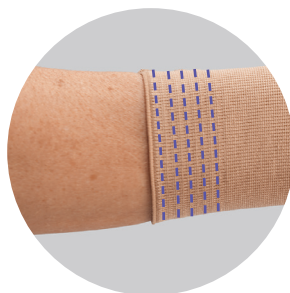

Prouse boord




Siliconen noppenboord




3/4 Ingenaaid siliconen
noppenboord

Opties

Overige

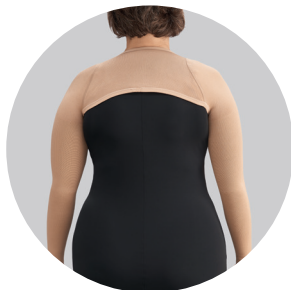

Eén-delige bolero

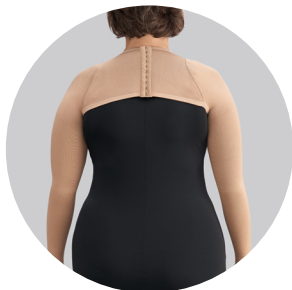

Twee-delige bolero



Schouderkap met
lichaamsgordel



Schouderkap met
BH-bevestiging



Ellebooghoek




Functiezone elleboog



Rits



Rits met haak&oogsluiting

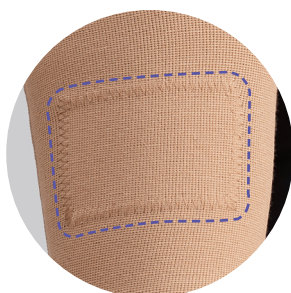

Siliconen strip



Pocket voor polsters



Voering

Bij een CE of CG armkous zit de naad standaard aan de buitenzijde.

Optioneel is de naad aan de binnenzijde.

Bij iedere voorziening die op de hand begint en bij alle voorzieningen met een schouderkap zit de naad altijd aan de binnenzijde.

Optioneel kan **het textiel-label aan de buitenzijde** geplaatst worden. Deze optie kan niet bij voorzieningen met een siliconenband.

Over SIGVARIS GROUP

Wij van SIGVARIS GROUP zijn er op gericht dat mensen zich goed voelen. Iedere dag opnieuw. Met onze hoogwaardige en innovatieve producten willen wij gezondheid en welzijn verbeteren.

Meer dan 150 jaar ervaring op het gebied van compressiehulpmiddelen

Als Zwitsers bedrijf is SIGVARIS GROUP 100% een familiebedrijf sinds de oprichting in 1864. Al bijna 100 jaar produceert SIGVARIS GROUP “rubber-elastisch textiel”, dat zowel in Zwitserland als daarbuiten wordt verkocht.

Vandaag de dag is de SIGVARIS GROUP een wereldwijd toonaangevende aanbieder op het gebied van medische compressietherapie. Onze portfolio dekt een groot aantal uiteenlopende behoeften en indicaties.

Een partner op wie u kunt vertrouwen

Wij van SIGVARIS GROUP zijn een betrouwbare en ervaren partner voor onze klanten over de hele wereld, waaronder apotheken, drogisterijen, orthopedische en medische speciaalzaken, alsmede medische professionals en ziekenhuizen.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Zwitserland en wij hebben eigen productie-faciliteiten in Zwitserland, Frankrijk, Polen, de VS en Brazilië. Met dochterondernemingen in Duitsland, Oostenrijk, Engeland, Italië, Canada, China, Australië, Mexico en een kantoor in de Verenigde Arabische Emiraten, evenals verkooppartners in meer dan 70 landen op alle continenten, zijn wij dicht bij onze klanten.

Onze portfolio is gebaseerd op merken die gericht zijn op diverse behoeften en indicaties. Enerzijds willen we patiënten met veneuze aandoeningen, lymfoedeem en lipoedeem helpen om hun leven zo onbeperkt mogelijk te leven. Anderzijds moeten de positieve effecten van compressietherapie in het dagelijkse leven, op het werk, tijdens reizen en tijdens het sporten ook toegankelijk worden gemaakt voor mensen die zich bewust zijn van hun gezondheid (zonder de aanwezigheid van een medische aandoening).



sigvaris

**Nederland**

PROFLEBO BV
Hekkehorst 28
7207 BN Zutphen
Tel 0575 725 999
M info@proflebo.nl
www.proflebo.nl

Export

SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8
9014 St. Gallen
Switzerland
Phone +41 71 272 40 00
Fax +41 71 272 40 01

**We are dedicated to helping people feel
their best. Every day.**

SIGVARIS and SIGVARIS GROUP are registered trademarks of SIGVARIS AG,
CH-9014 St. Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.
© 2022 Copyright by SIGVARIS AG, CH-9014 St. Gallen/Switzerland

**SIGVARIS
GROUP**